

製品ニュース

SAFETY FOR THE PATIENT
-The Technowood Standard-

平成23年3月16日号 1/2

製造販売業者: トノクラ医科工業株式会社

お客様各位

人工心肺関連装置の停電時のご使用について

前略

平素は弊社製品に各別のご愛顧頂き誠にありがとうございます。

さて、3月11日（金）に発生致しました東北地方太平洋沖地震により関東地方及び東北地方では計画停電が予定されていますので、停電時のご使用についてご案内いたします。

何卒ご理解及びご対応を宜しくお願いいたします。

記

- CP4000 （心筋保護ポンプシステム・ダブルポンプシステム）
- CP3000 （心筋保護ポンプ）
- HEU-300 （冷温水槽装置）
- CompoⅢ （トーノックコンポーネントシステムⅢ型人工心肺装置）※UPScⅢ非搭載仕様

上記製品に関しましてはバッテリーを搭載しておりませんので、停電時は使用できません。

下記の点に注意をお願いいたします。

*使用中に停電した場合、また電源スイッチを切った場合には、取扱説明書に記載されている各設定値はバックアップされますが、装置は停止状態となります。

- ・停電が予想される場合は、必ず電源スイッチを切って待機して下さい。
- ・停電復帰したことを確認してから再度スイッチを入れて下さい。
- ・電源投入後は取扱説明書の「取扱方法」又は添付文書の「操作方法又は使用方法」に従い使用をお願い致します。
- ・停電が予想される場合は、無停電電源への接続をお願いいたします。

2/2へ続く

製造販売業者

PN110316N

トノクラ医科工業株式会社

〒113-8435 東京都足立区江北4-30-19

代表 03-3856-4111 ファックス 03-3856-4113

カスタマーセンター 048(932)2573 ファックスフリーダイヤル

0120(32)2571

製品ニュース

SAFETY FOR THE PATIENT
-The Technowood Standard-

平成23年3月16日号 2/2

製造販売業者:トノクラ医科工業株式会社

御取引先様各位

人工心肺関連装置の停電時のご使用について

● CompoIII (トノックコンポーネントシステムⅢ型人工心肺装置) ※UPScIII搭載仕様

上記製品では、UPScIII (バッテリーユニット) に接続されたポンプ及びLCDモニターが、約20分間バックアップされます。

およそのバックアップ残時間は、ポンプベース前面のバッテリーインジケータランプ (バーグラフ) にて表示されます。

バックアップ時間は、駆動状況によって変化しますので、必ず確認の上ご使用下さい。

注: バッテリー (UPScIII) は、あくまで緊急時の安全確保のためのもので、バッテリー駆動でのご使用を推奨しているものではありません。

予め停電が予測される場合は、無停電電源への接続をお願い致します。

本件に関するお問い合わせは、お手数ですが下記までお願い申し上げます。

連絡先 03-3856-4111 (本社・江北工場)

※東京電力による計画停電の場合上記電話が不通になる場合があり、弊社は第5グループに属しておりますので東京電力のホームページ上でご確認の上宜しくお願いします。